

メジテック・解体マニュアル

※十分な減衰をまち解体して下さい

(解体目安：検定日より2～3か月)

※鉛の落下に注意し、できる限り低い場所で作業してください。

1 上蓋の両端にある凹みに親指をかけ、上蓋を外します



2 鉛上蓋・中蓋を外し、カラムを取り出し廃棄して下さい。※針刺し注意



3 生理食塩液側針に空の生食バイアルを差込むなどしてロックを解除し、針カバーからニードルガードバイアルを取り出し不燃物として廃棄してください。



	RI廃棄物分類
①カラム	不燃物
②針 ^{※1}	
③フィルター	難燃物
④アダプター(RIに触れた場合) ^{※2}	

※1 生食側は直接RIに触れていないので一般の針としても廃棄できます。誤刺にご注意ください。
 ※2 通常は一般ごみとして廃棄できます。RIに触れた場合は難燃物で廃棄します。

4 鉛蓋や上蓋を元に戻し、右の写真のように回収箱に収納して下さい。

