

クリプトンジェネレータ・解体マニュアル

※鉛の落下に注意し、できる限り低い場所で作業してください。

- 1 鉛容器本体を覆っているフィルムをはがします。




- 2 鉛容器の上蓋・中蓋をはずし、カラムを抜き取ります。



- 3 鉛容器を、「クリプトン専用回収箱」に収納してください。



- 4 カラム部分を、チューブ、カヌラ、カラムに分別し、廃棄してください。

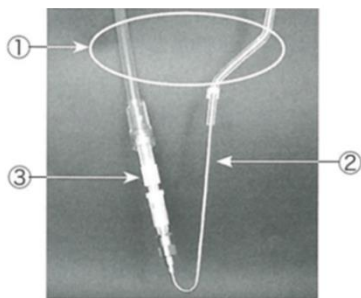

	RI廃棄物分類
①チューブ	不燃物
②カヌラ	
③カラム	難燃物